

(別紙)

平成25年11月5日

アドバイス支援（試用評価）依頼概要書

1. 依頼者の概要

事業者名	株式会社ウェルケアベッド		
担当者名	味岡 淳二		
担当者連絡先	住所	〒162-0825 東京都新宿区神楽坂 6-26-201	
	電話	03-6265-3437	
	電子メールアドレス	J_ajioka@wcb.co.jp	
主たる業務	介護福祉機器の製造販売		
主要な製品	浴槽付介護ベッド		
希望する施設等の種類、職種	・ 在宅の介護に関わる、訪問介護、訪問看護、ケアマネ ・ ご利用者様とご家族（身障者の方もOK） ・ 財政負担軽減と在宅介護課題解決の観点で自治体の方々		
アドバイス（試用評価）機関の所在する地域希望	首都圏		
その他			

2. 試作機あるいは機器開発コンセプトの概要

機器の名称（仮称）	浴槽付介護ベッド「夢神楽」
-----------	---------------

優しさのコミュニケーションを提供します



介護できる幸せ 介護される幸せ



▶ 重介護からの解放とおしゃれな生活で心にゆとりが生まれます

Confidential

▶ 43

Copyright: 2013 Wellcare Bed

機器の写真あるいは
コンセプトイメージ

ハンモックで楽々入浴

▶ 昇降機能を活用してハンモックを吊り上げます



1、側臥位にして)ハンモックを下に敷き、ハンモックベルトを天蓋に固定します。

* ハンモックに施したスライドシートを使って簡単に敷くことができます。

* スライドシートにより、ハンモックの網と皮膚の擦れを防ぎ、床ずれ(褥瘡)に優しい構造にしました。

2、昇降ボタンを操作しベッドを低床状態にします。

* ベッドマット面が下がると同時にハンモックが上がり、ハンモックとベッドマットが離れます。

3、手すりを外し、ベッドマットを抜きます。

* 3分割してあるので、ベッドマットを楽々と抜くことができます。

3、箕子はずします。
* 箕子の上を下して脱着などの入浴準備をすることも可能です。

* 3分割してある一部のベッドマットや箕子を残すことによって、状況に応じた使い方が可能です。(例: 足湯、洗髪、腰部洗浄)

4、箕子を取り、ハンモックを卸すと、浴槽に全身を入れることができます。

Confidential


▶ 44

Copyright: 2013 Wellcare Bed

介護の常識を変えるエレガンスな空間



負担を大幅に改善した
独創性ある機構

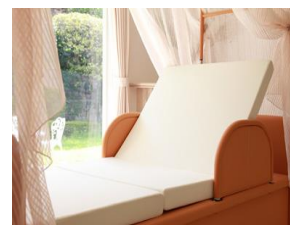

作業性を追求した
きめ細かな配慮



こだわりのデザイン
と、上質な作り込み




主な仕様

介護者の負担を軽減し、笑顔で介護品質を上げ、 要介護者も快適な日々を過ごす。楽々老々介護。

機器の目的及び特徴

- ▶ ゆったり全身入浴できる樹脂型バスタブ
 - ▶ 寝ながら洗髪も可能
- ▶ どこでも簡単に使用できる簡易シャワー
- ▶ 手軽な給排水、20ℓタンク対応
- ▶ 力のいらぬ自動昇降ハンモック
- ▶ 褥瘡(床ずれ)に優しいハンモックシート
- ▶ 脱着可能な軽くて快適3分割マット
 - ▶ 介護状況に応じてマットの組み合わせを選択可能
- ▶ 3分割箕子で多彩な用途に対応
 - ▶ 全身浴、足湯、リクライニング、洗髪
- ▶ 温もりのある上品でおしゃれなデザインと外装
 - ▶ 簡単に品のあるシャワーカーテン(天蓋)とサイドレール
- ▶ 多機能な天蓋
 - ▶ カーテン以外にテレビ、鏡台も、更にリハビリツールもセット
- ▶ 状況に合わせた組み合わせ
 - ▶ 浴槽、ハンモック、天蓋は交換可能
- ▶ ユニット交換で簡単保守メンテ可能
- ▶ 無段階電動リクライニング機構(*)
- ▶ 自動昇降機能(470mm~770mm)(*)

注*: 福祉用具貸与規定上必要なもの

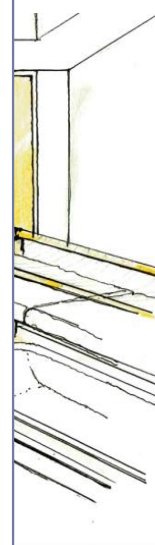

Confidential

▶ 43

Copyright: 2013 Wellcare Bed

想定する使用者

- 1、入浴の介助が必要な方およびその家族、介護者
 - ・ 要介護 4~5 の寝たきり
 - ・ 在宅介護
 - ・ 褥瘡(床ずれ)の対応が必要な方
- 2、リハビリや自立支援、認知予防として
 - ・ フレームにロープなどを付けたリハビリ(例: Redcord)
 - ・ 入浴効果を生かした、効果的なりハビリ、精神ケア、認知予防

想定する使用方法 や使用環境

- 1、自宅や施設での入浴
 - ・ 給排水工事は無くても、付属のタンクとシャワーで給排水可能です
建物内に給湯と排水(例えばバスルームなど)があればOKです
- 2、リハビリ、自立支援、認知予防
 - ・ フレームにロープなどを付けたリハビリ(例: Redcord)
 - ・ 入浴効果を生かした、効果的なりハビリ、精神ケア、認知予防

開発に至った背景


入浴や排泄に関わる重介護から介護者と要介護者を解放したい

在宅介護の負担を軽減し、家族の絆を取り戻し、優しさのコミュニケーションの場を提供したい

「介護できる幸せ、介護される幸せ」

更に、介護の作業性を向上させ、財政負担軽減にも繋げたい

介護を取り巻く課題を解決

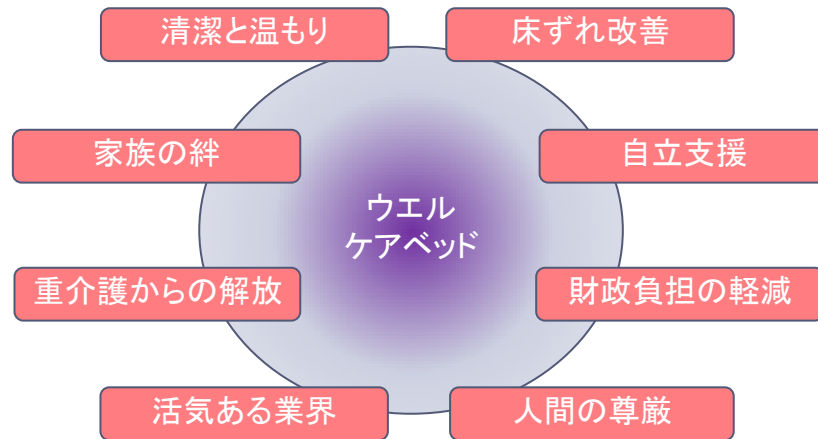

- ▶ 私たちは介護生活の空間に優しさのコミュニケーションを提供します。
- ▶ 介護できる幸せ、介護される幸せ 家族の愛

Confidential

▶ 15

Copyright: 2013 Wellcare Bed

現在の開発状況	<p>開発が終了し、最初のモデルの販売を開始したところです。</p> <p>開発段階で試作品に対し介護や医療に携わる方がからご意見をいただき、要望を盛り込んでおります。</p> <p>更に市場のご意見をいただき改善を続けていきます。</p>
現在の課題	<p>想定利用者の方々へのコネクション</p> <p>現在のところ介護保険対象外</p>
アドバイス（試用評価）をしてほしい事項	<ol style="list-style-type: none"> 1、評価できるところ 2、気になるところ 3、改善事項、要求事項 4、本製品を使用したときの、更なる効果的な介助方法の提案
その他	